



K-PL100 身体移乗用 リフトクレーン

K-PL100は、車椅子から車両座席への移乗、また、その逆の移乗を容易にするKivi社の新型クレーンで、使用者が困難なく車内に入出りできる様にします。デバイスは、車両シート座面の最上部と車椅子座面（クッションがある場合も考慮してください）の高低差が50センチを超えない場合、3ドア、または、5ドア車両の左右どちら側にも取り付けることができます。このシステムは、ブラケット（固定、または、可動）、関節式アーム、吊り上げ式シート型スリング（S・M・Lサイズ）、操作ボタンから成ります。K-PL100の使用は、簡単です：車椅子をご利用の方を車両に近づけ、介助される方は、乗車される方の背後に吊り上げ式シート型スリングを位置付け、そのベルト下部を太腿の下に、ベルト上部を脇の下に通して装着させます。その後、吊り上げ式シート型スリングの4つの端を、リフトのアーム上にあるボルトに引っ掛けます。上下の動きは操作ボタンを介して電動制御されますが、車内に入出りするための横方向の動きは手動制御されます。可動式ブラケットに組み合わせて使用する場合、車体上や車内でのリフトの取り付け作業は必要無く、ブラケットはドアの元のヒンジ上に位置付けられます。人を持ち上げるための吊り上げ式シート型スリングと関節アームは、ブラケット本体にある2本のボルトに連結されるだけです。そのため、車両は元のコンディションに戻すための作業を実施することなく、いつでも再販売することができます。可動式ブラケットに組み合わせて使用する場合、旅行中、または、不使用の場合に、可動式ブラケットとクレーンを容易に解体してトランクに収納することができます。一方、クレーンが固定式ブラケットに組み合わせて使用される場合、不使用時、クレーンだけが抜き取られ、ブラケットは常に車両に固定されたままです。



www.kivi.it | info@kivi.it



facebook.com/Kivisrl



youtube.com/KiviMobilityFreedom

取扱店



K-PL100は、壁面取付用ブラケット、または、可動式カートと組み合わせ、身体移乗用リフトクレーンとして屋内外で使用することもできます。第1のケースでは、クレーンの関節アームをブラケットに挿入し、デバイスが使用される壁面の希望する高さに固定します。第2のケースでは、クレーンのアームを車輪付きの特別なカートに挿入し、どこでも使用できるようにします。不使用の場合、カートは容易に解体することができます、わずか97cmの長さの空間を必要とします。

同クレーンは車両、家、そして可動式カート上で使用することができます。

技術的情報:

- 最大積載量 100 kg
- 最大垂直変動幅 50 cm
- デバイスの重量 12.5 kg



電磁両立性試験合格



www.kivi.it | info@kivi.it

facebook.com/Kivisrl

youtube.com/KiviMobilityFreedom

取扱店